

ÁREA: INMUNOLOGÍA Y PRUEBAS ESPECIALES



MES:

AÑO:

DIARIO PRUEBA DEL SISTEMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. PIPETOR (3)																															
2. WASHER (3)																															
3. CHAMBER (3)																															
4. BGW (1)																															
5. LC-LE (1)																															
6. LC-RI (1)																															
SEMANTAL	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4									
1. LIMPIAR LA SUPERFICIE DE LA AGUJA DE PIPETEO CON ALCOHOL																															
2. LIMPIAR LA CUBIERTA DEL ANALIZADOR CON AGUA																															
MENSUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. LIMPIAR LOS 3 PARECES DE AGUJAS DE LA ARANDELA CON ALCOHOL Y/O AGUA DESTILADA																															
2. REEMPLAZAR LOS STARTES CON AGUA CALIENTE A 40°C, PROCESAR 30 CICLOS Y VOLVER A COLOCAR LOS STARTERS EN EL SISTEMA Y CEBAR 10 CICLOS MÁS																															
3. USAR LA "SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE MAGLUMI" PARA LIMPIAR EL SISTEMA DE TUBERÍAS																															
4. LAVAR EL TANQUE DE DECHEOS CON CLORO Y ENJUAGAR CON AGUA																															
5. LAVAR EL TANQUE CON SOLUCIÓN WASH CON AGUA DESTILADA 5 VECES.																															
6. PREPARAR LA SOLUCIÓN DE LAVADO (6 HORAS ANTES) Y REALIZAR 30 CICLOS PARA LLENAR NUEVAMENTE LAS TUBERÍAS PRIMARIAS. (PIPETA Y ARANDELA)																															
CCI NIVEL 1																															
CCI NIVEL 2																															
CCI NIVEL 3																															
PACAL (CONTROL EXTERNO)																															
CALIBRACIÓN																															
CAMBIO DE REACTIVO																															
REALIZÓ (SIGLAS)																															
VERIFICÓ (SIGLAS)																															